



## Erste Schritte mit Stellest Myopia Suite

- 1) Account anlegen lassen unter <https://forms.office.com/e/qh8YEiVFWj?origin=lprLink>
  - a. Formular kann nur von Mitarbeitenden von EssilorLuxottica Lenses und Instruments ausgefüllt werden
  - b. Account wird innerhalb 1 Woche angelegt
- 2) Private Mailadresse muss bestätigt werden
  - a. Bitte täglich Mails und SPAM checken, ob eine Mail von [no-reply@auth0user.net](mailto:no-reply@auth0user.net) mit dem Betreff „Verify your email“ eingegangen ist
  - b. Mailadresse verifizieren (durch click auf den Link in der Mail)
- 3) Authenticator-App installieren
  - a. Nähere Beschreibungen siehe Bedienungsanleitung Stellest Myopia Suite
- 4) [www.stellestmyopiasuite.com](http://www.stellestmyopiasuite.com) besuchen
  - a. „Passwort vergessen“ klicken, um ein eigenes erstes PW festzulegen
  - b. Mit eigenem Zugang und Passwort einloggen
  - c. Authenticator mittels QR-Code einrichten
  - d. Checkbox „Dieses Gerät 30 Tage lang speichern“ anwählen (keine Authentifizierung für die nächsten 30 Tage nötig)
  - e. Datenschutzhinweise bestätigen => alle Seiten müssen durchgeblättert werden, um „Akzeptieren“ drücken zu können
    - i. Ggf. zuerst auf ENG stellen (ob rechts auf der Seite), danach auf DE, dann sind alle Seiten auch sichtbar
- 5) Beratungstool Stellest Myopia Care nutzen 😊